

BARRIER® Trousse Cardio-vasculaire

- Imperméabilité totale des champs
- Champ fendu vasculaire avec protection génitale redessinée
- Champ thoracique avec film d'incision intégré, poches de recueil transparentes intégrées et meilleure absorption autour de la zone d'incision
- Zone d'anesthésie plus large avec bandes auto-adhésives intégrées permettant une fixation aisée
- Couche inférieure absorbante pour le confort de patient





01 Si vous le souhaitez, commencez le drapage en plaçant un champ de table sous les jambes du patient. Placez le champ fendu vasculaire sous les jambes du patient. Dépliez le champ et drapagez le patient.



02 Fixez la protection génitale intégrée.



03 Recouvrez les pieds du patient avec les protège-pieds.



04 Le champ adhésif de 75x75 cm peut être utilisé comme protection complémentaire pour la zone du cou. Enlevez le papier protecteur du champ thoracique.



05 Placez le champ thoracique au centre du thorax du patient. Dépliez le champ des deux côtés.



06 Dépliez UNIQUEMENT le premier pli de partie inférieure du champ thoracique. Dépliez la partie supérieure du champ au-dessus de l'arceau d'anesthésie. Les bandes auto-adhésives peuvent être fixées du côté de l'anesthésie.



07 Après l'excision chirurgicale de la greffe de veine, dépliez le reste de la partie inférieure du champ thoracique.



08 La mise en place des passe-tubulures et de la poche pour défibrillateur complète le drapage.

Trousse cardio-vasculaire / numéro d'article 694640	Dimensions (cm)
1 housse de mayo renforcée	79 x 145
6 cellduk	19 x 25
1 champ de table	150 x 190
1 poche pour défibrillateur	33 x 38
2 passe-tubulures	2,5 x 30
3 op-tape	9 x 49
2 protège-pieds (vert)	
2 protège-pieds (transparent)	
2 champs adhésifs	75 x 75
1 champ fendu vasculaire (fente: 20x102 cm)	200 x 260
1 champ thoracique (film d'incision: 32x40 cm)	200/300 x 330
1 champ de table	150 x 240

Emballage: 3/6

