

# BARRIER® Champ de hanche avec sacs de dislocation et Drisite® Plus



- Drisite® Plus\* assure une absorption et une gestion efficace des fluides
- Matériaux résistants et renforcés dans la zone critique, pour une qualité fiable et un haut degré de résistance à la déchirure
- Modèle tridimensionnel créant une vaste zone protégée pour l'anesthésie
- Passe-tubulures intégrés pour faciliter la manipulation des instruments
- Pliage optimal pour une application aseptique et une mise en place aisée par une seule personne
- Matériaux imperméables pour une sécurité optimale du patient

\* Drisite® Plus est un système breveté pour la gestion des fluides se scinde en trois zones, composé d'une barrière sèche, résistante et absorbante.


# Instructions d'utilisation




1. Dépliez la housse de table et placez-la sous la jambe du patient.



2. Option 1: placez un champ adhésif sous la jambe en orientant le bord adhésif vers la tête, puis retirez le papier protecteur. Placez un deuxième champ adhésif par-dessus la première en orientant le bord adhésif du côté opposé au patient.

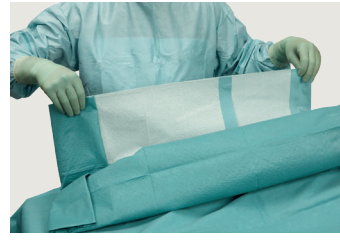

3. Repliez l'un des bords autour de la jambe. Repliez le deuxième champ sur le pied et collez le bord adhésif sur la jambe.

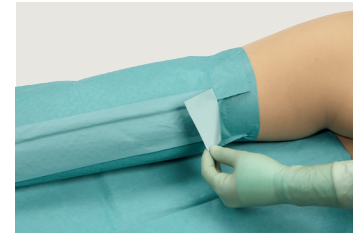

4. Faites adhérer les bords autour du pied et le long de la jambe à l'aide de bandes adhésives.



2. Option 2: couvrez la jambe avec une stockinette et fixez-la à l'aide de bandes adhésives.



5. Faites passer la jambe dans l'ouverture. La bande adhésive située sous le champ offre une sécurité supplémentaire.



6. Tirez le champ vers la tête du patient et fixez l'ouverture élastique dans la position appropriée.



7. Dépliez le champ par-dessus le cadre d'anesthésie.

N° de réf.	Description	Disp/Trp
60602	Trousse de hanche avec sacs de dislocation	3/6
	1 housse de Mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant 4 serviettes absorbantes 18x25cm 1 champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant 2 champs adhésifs 75x75cm 1 stockinette 32x120cm 2 bandes adhésives 9x49cm 1 champ de hanche avec sacs de dislocation 230/300x330cm, ouv. 18x22cm élastique 1 champ de table renforcé, 150x190cm, 75x190cm absorbant	
60601	Champ de hanche avec sacs de dislocation 230/300x330cm, ouv. 18x22cm élastique, emballé	4/8

Tous ces composants des trousse peuvent également être inclus dans les trousse Mölnlycke®.

N° de réf.	Composant de trousse composites Mölnlycke®
70601	Champ de hanche avec sacs de dislocation 230/300x330cm, ouv. 18x22cm élastique

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be)

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, B-2600 Berchem, Belgique  
Tél. 03 286 89 50. Fax 03 286 89 52

Le nom, le logo et la marque de Mölnlycke et BARRIER sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care.  
© 2017 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. (BFSU00861709)

**Mölnlycke®**