

Guide d'auto-soins pour changer un pansement

Votre infirmier(-ère) a choisi un pansement Mepilex® Border pour votre plaie

Marche à suivre pour appliquer un pansement Mepilex® Border

1. Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon pendant 20 secondes.
2. Nettoyez la plaie en suivant les recommandations de votre infirmier(-ère) et séchez soigneusement la peau périlésionnelle.
3. Veillez à ce que le coussin recouvre la peau sèche autour de la plaie au moins sur 1 à 2 cm.
4. Ôtez le feuillet protecteur et appliquez le pansement face adhésive vers le bas, sans tirer sur le pansement.



5. Lissez tous les bords.



Quand changer votre pansement

Votre infirmier(-ère) vous conseille de changer le pansement :

Pour une aide et des conseils, veuillez contacter votre infirmier(-ère) :

Attention :

- Il se peut que le dos du pansement se décolore, c'est tout à fait normal
- Votre pansement peut rester en place plusieurs jours
- Vous pouvez prendre une douche avec votre pansement
- Le pansement Mepilex Border Flex est à usage unique et ne peut pas être réutilisé

Le pansement Mepilex Border doit être manipulé et changé par un-e professionnel-le de la santé, mais si aucun-e n'est disponible, un-e membre de votre famille ou vous-même pouvez être amené-e à le changer. Le fabricant rejette toute responsabilité concernant l'application d'un pansement par ces personnes. Par conséquent, si le pansement Mepilex Border est appliqué par une personne qui n'est pas un-e professionnel-le de la santé, l'utilisateur-ric-e le fait à ses propres risques et périls.

Pour d'autres informations, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72 boîte 2, 2600 Berchem (Anvers), Belgique. Téléphone +32(0)3 286 89 50.
Les marques, noms et logos Mölnlycke et Mepilex sont déposés par une ou plusieurs sociétés du groupe Mölnlycke Health Care pour le monde entier.
©2020 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés. BFWC00042007


Mölnlycke®